

# Spezial Ölspray

## Műszerápoló spray

- **Toxikológiailag jelentéktelen, orvosi fehér-olaj bázisú**
- **Műszerápolás gőzsterilizálás előtt**
- **Mozgó alkatrészeknek optimális kenést biztosít**
- **FCKW-mentes**



DR. SCHUMACHER

ESZKÖZ

## Készítmény típusa

A **Spezial Ölspray** orvosi műszerek és egyéb rozsdamentes eszközök, pl. turbinák, zsanérok, fogászati fúrók, sarokpántok kezelésére használható ápoló spray. A készítmény ugyanúgy alkalmas merev endoszkópok csuklójának, mint a nem gondozásmentes csapok ápolására.

A speciális szelepnek köszönhetően a spray finom védőréteget képez a felületen. A védőréteg nem befolyásolja a későbbi sterilizálást. A **Spezial Ölspray** egyedi gőzát-eresztő tulajdonságának köszönhetően gőzsterilizáláshoz is alkalmas. megőrzi a műszerek minőségét a megfelelő olajozottság és a hatékony korrózió-védelemnek köszönhetően. A **Spezial Ölspray** kiterjedt anyagbarát tulajdonságának és jelentéktelen toxicitásának köszönhetően megfelel a gyógyszer- és élelmiszeripari előírásoknak.

## Alkalmazási területek

Rozsdamentes acél eszközök kezeléséhez:

- orvosi műszerek (pl. gőzzel történő sterilizálást megelőzően);
- lég- vagy csapágyas turbinákhoz;
- zsanérokhoz, kézi- és könyökdarabok;
- merev endoszkópok csuklójának, és nem gondozásmentes csapjaik ápolására.

A készítmény garantálja a műszerek mozgó részeinek optimális olajozottságát. A nemesacél eszközök felületén képződött védőrétegnek köszönhetően garantált a hatékony korrózióvédelem.

## Felhasználás

### Műszerek:

Fújja be a félig nyitott műszert kb. 25 cm-es távolságból. Utána a jelzés szerint sterilizálja a műszert. Figyelmeztetés: Ne használjon túl sok olajat, nehogy akadályozza a sterilizáló hatást. Vékony filmrétegnek kell képződnie.

### Zsanérok, turbinák vagy fogászati fúrók és sarokpántok:

Használja naponta kétszer, vagy fújja be az eszközöket kb. 1 másodpercig a sterilizálás vagy autoklávozás előtt. A termék használatához a flakont tartsa függőlegesen! Használat előtt felrázandó. Gőz- vagy forró légsterilizáláshoz 180 °C-ig használható.

## Összetétel

Orvosi fehér-olaj DAB10 szerint  
Propan-bután hajtógáz (FCKW-mentes)

## Szállítási formák

Kiszerezés	CSE.	Cikkszám
500 ml	12 x 500 ml	00.108.050

## Speciális útmutató

A flakonban túlnyomás uralkodik. Ne tegye ki közvetlen napfénynek és 50°C feletti hőmérsékletnek! A flakont még üres állapotban is tilos kinyitni és tűzbe dobni! Fokozottan tűzveszélyes. Tilos nyílt lángra, vagy bármilyen izzó anyagra permetezni. Gyújtóforrástól távol tartandó, használata közben tilos a dohányzás. Csak jól szellőző helyiségben használja!

A **Spezial Ölspray** a latex és gumi elemek hullámosodását megakadályozza, egyéb esetben használja a **Silikonspray**-t.

Tilos endoszkópokhoz síkosító anyagként használni!

## Környezetvédelmi információ

A Dr. Schumacher GmbH által gyártott termékek modern, biztonságos és környezetkímélő eljárások mellett készülnek. A magas minőségügyi szabványok betartása garantálja a termékek állandó, kiváló minőségét. A cég a következő DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001 szabványok szerint tanúsított, valamint megfelel az EMAS érvényes környezetmenedzsment rendszerének.

## Forgalomba hozatali információk

Megfelel az EU 92/42/EWG irányelvében foglaltaknak.

### Gyártja

Dr. Schumacher GmbH — Melsungen, Németország

### Forgalmazza

Dr. Schumacher—Sz&T Magyarország Kft

### Engedélyek

Nem engedély- és bejelentés köteles