

Eco Wipes

Vlies kendő felületfertőtlenítő-szerrel való átitatáshoz

- Minden felületfertőtlenítő-szerhez használható
- Újratölthető adagolórendszer
- Megfelelő hatásfokú fertőtlenítést biztosít
- Nagyon gazdaságos



A gazdaságos
alternatíva!



DR. SCHUMACHER

Készítmény típusa

Felületek és orvostechikai eszközök gyors és egyszerű tisztítására és fertőtlenítésére használható száraz kendő, mely igény szerinti fertőtlenítőszerekkel itatható át.

A kendő anyaga minőségi, magas értékű, szőszmentes Vlies-anyag. A kendő mind a munka kész gyors fertőtlenítőszerekkel, mind a fertőtlenítőszerekből előállított munka kész oldatokkal használható.

Az **Eco Wipes**-ot **kimondottan felületfertőtlenítésre fejlesztették ki**. Kiválóan kiadja a fertőtlenítőszerrel és ezáltal a fertőtlenítendő felületeket kifogástalanul nedvesíti.

Az **Eco Wipes** adagolását a speciálisan hozzá kifejlesztett **Eco Wipes adagolórendszer**ből lehet elvégezni. A kendőt egy praktikus, visszazárható adagolóból lehet kivenni.

A visszazárható rendszer megfelelő védelmet biztosít a munkaoldat külső kontaminációjával és a kipárolgással szemben.

Eco Wipes Adagolórendszer

Egy, a munkaoldat előállítására, higiénés tárolására és a kendő megfelelő adagolására kifejlesztett polietilénből és polipropilénből gyártott adagolóvödör. Az adagolást egy a kimondottan a felhasználás érdekében kifejlesztett tökéletesen záró, visszazárható adagolórendszerből végezhetjük el.

A vödör 60 °C-ig mosogatógépekben is tisztítható.

Minden egyes **Eco Wipes** tekercs tartalmaz egy speciális matricát, melyen dokumentálható a munkaoldat gyártási-, lejárati ideje és sarzsza.

Felhasználás

Készítsünk 2,5-3 liter (50 lapos kendő esetén 1-1,5 liter) munkaoldatot a kívánt fertőtlenítőszerekből (a koncentrációt és a behatási időt lásd az adott termék-nél).

Végezetül itassuk át a kendőt az adagolóvödörben 2,5 -3 liter (50 lapos kendő esetén 1-1,5 liter) a fertőtlenítőszerekből előállított munkaoldattal, vagy a munka kész alkoholos fertőtlenítőszerekkel. A teljes tekercs kifogástalan átitatásához 30-60perc szükséges.

A felületeket és a tárgyakat gondosan töröljük át.

Az adott fertőtlenítőszere vonatkozó behatási időket vegyük figyelembe!

Az **Eco Wipes** a Dr. Schumacher GmbH által gyártott fertőtlenítőszerek mellett más gyártók fertőtlenítőszereivel is használható. Kérjük vegye figyelembe az adott gyártó előírásait.

A Dr. Schumacher GmbH felületfertőtlenítő szereinek eltarthatósági ideje a kendő átitatását követően minden esetben eléri a 28 napot. *

Az **Eco Wipes** az adagolócsillagból egyesével letéphető és kivehető. A következő kendő a tetőben kiképzett tároló csészében biztonságosan tárolható.

A felhasznált fertőtlenítőszere gyártási-, lejárati idejére, ill. sarzsra vonatkozó adatok dokumentálását megkönnyítő speciális címkét minden egyes vlies-tekercshez mellékeljük.

***Utasítás:** A 28 napos eltarthatóság a Dr. Schumacher GmbH felületfertőtlenítő szereivel mellett a konkurens gyártók legtöbb termékére is igaz. Mindemellett néhány felületfertőtlenítő szer esetében nem valósítható meg a 28 napos eltarthatási idő. Vannak olyan készítmények, amelyek az összetételükben fogva 28 napon túl kémiaiilag nem stabilak. Egyes termékek kémiai stabilitását jellemezheti a zavarosság, ebben az esetben kérjük konzultáljon velünk, vagy az adott termék gyártójával.

Eco Wipes

Vlies kendő felületfertőtlenítő-szerrel való átitatáshoz

Felhasználási terület

Az **Eco Wipes**-ot az orvosi épületek, mint kórházak, ápoló otthonok és rendelők, gyógyszeripar, laborok, valamint az élelmiszeripar és konyhák minden területén használhatjuk felület-fertőtlenítésre és tisztításra.

A termék különösen jól alkalmazható:

- beteg közeli helyeken, mint éjjeli szekrények, ágyak, vizsgálóágyak, valamint elkülönítő helyiségek;
- minden munkafelületen;
- minden olyan helyszínen, ahol a vízvételi lehetőség nem biztosított, vagy ahol a takarítóeszközök használata higiénés okokból nem lehetséges;
- nehezen hozzáférhető helyeken;

Összetétel

100 vagy 50 lapos, 32 cm x 30 cm-es lapokból álló száraz kendőtekercs, mely magas minőségű, szőszölésmentes spunlace, lyuggatott, 100%-ban műszálkeverékből készült vlies-kendő

Szállítási formák

Kiszereles	CSE.	Cikkszám
Eco Wipes 100 lapos	3x1 tekercs	00.915.REW10003
Eco Wipes 100 lapos	6x1 tekercs	00.915.REW10006
Eco Wipes 50 lapos	3x1 tekercs	00.915.REW5003
Eco Wipes Adagolóvödör üres	1x1 vödör	00.915.EEW001
Eco Wipes Adagolóvödör üres	6x1 vödör	00.915.EEW002

Adagolóeszközök

Kiszereles	CSE.	Cikkszám
Eco Wipes Falirtó	1 x1 db	00.902.EIM



Szakvélemények

Dr. Wecker, Dr. Schumacher GmbH, Melsungen
Szakvélemény a **Eco Wipes** kendőanyagának felület-fertőtlenítőszerrel való impregnálásra való alkalmasságáról.

Dr. Brill, higiénikus, Hamburg
Szakvélemény a *Cleanisept®*, *Biguanid Fläche N*, *Descosept AF*, *Descosept Pur*, *Optisept*, *Ultarsol F*, *Incidin Plus* és *Optisal N* mikrobiológiai stabilitásáról **Eco Wipes** rendszerben.

Környezetvédelmi információ

A Dr. Schumacher GmbH által gyártott termékek modern, biztonságos és környezetkímélő eljárások mellett készülnek. A magas minőségügyi szabványok betartása garantálja a termékek állandó, kiváló minőségét. A cég a következő DIN EN 13485, DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 & BS OHSAS 18001 szabványok szerint tanúsított, valamint megfelel az EMAS érvényes környezetmenedzsment rendszerének.

Forgalomba hozatali információk

Megfelel az EU 92/42/EWG irányelvében foglaltaknak.

Gyártja

Dr. Schumacher GmbH — Melsungen, Németország

Forgalmazza

Dr. Schumacher—Sz&T Magyarország Kft

Engedélyek

Nem engedély-, bejelentés köteles